

Odporúčané parametre EXOCAD

ZrO₂

Dosed korunky

SPÁRAOKRAJPODSEKŘÍVINY

Spára pro cement

☐ Bez spáry pro cement.

Spára

0,055 mm

Přidat další oblast...

Výška odlehčení

☐ Od okraje

0,3 mm

Přídavné odlehčení

Okluzně

0 mm

Radiálně

0,02 mm

OK

Zrušit

Dosed korunky

SPÁRAOKRAJPODSEKŘÍVINY

Parametry okraje korunky

1. Horizontální

0,2 mm

2. Sklon

0,2 mm

3. Úhel

65 °

4. Vertikální

0 mm

5. Okraj pod margin

0 mm

Znázornění parametrů



OK

Zrušit

Dosed korunky

SPÁRAOKRAJPODSEKŘÍVINY

Podsekřiviny

☐ Nevykřývat podsekřiviny

Úhel

0 °

Ochranná zóna v blízkosti preparace:

Velikost

0,1 mm

Frézování

☒ Rádus frézování

Průměr frézy

1,2 mm

☐ Tvar frézy, vypouklá/rovná

Zarovnání tvaru frézy %

80 %

Zobrazit podsekřivé

Použít

OK

Zrušit

 zuba

CoCr frézovaný/preparácia na schodík

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Spára pro cement

☒ Bez spáry pro cement.

☐ Spára 0,055 mm

Přidat další oblast...

Výška odlehčení

☒ Od okraje 0,3 mm

Přídavné odlehčení

Okluzně 0 mm

Radiálně 0,02 mm

OK Zrušit

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Parametry okraje korunky

1. Horizontální 0,01 mm

2. Sklon 0,1 mm

3. Úhel 90 °

4. Vertikální 0 mm

5. Okraj pod margin 0 mm

Znázornění parametrů



OK Zrušit

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Podsekřiviny

☐ Nevykrývat podsekřiviny

Úhel 0 °

Ochranná zóna v blízkosti preparace:

Velikost 0,1 mm

Frézování

☒ Rádus frézování

Průměr frézy 1,3 mm

☐ Tvar frézy, vypouklá/rovná

Zarovnání tvaru frézy % 80 %

Zobrazit podsekřivé Použít

OK Zrušit

CoCr frézovaný/preparácia do stratená

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Spára pro cement

☒ Bez spáry pro cement.

☐ Spára 0,055 mm

Přidat další oblast...

Výška odlehčení

☒ Od okraje 0 mm

Přídavné odlehčení

Okluzně 0 mm

Radiálně 0,02 mm

OK Zrušit

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Parametry okraje korunky

1. Horizontální 0,1 mm

2. Sklon 0,15 mm

3. Úhel 70 °

4. Vertikální 0 mm

5. Okraj pod margin 0 mm

Znázornění parametrů

OK Zrušit

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Podsekřiviny

☐ Nevykřívat podsekřiviny

Úhel 0 °

Ochranná zóna v blízkosti preparace:

Velikost 0,1 mm

Frézování

☒ Rádus frézování

Průměr frézy 1,3 mm

☐ Tvar frézy, vypouklá/rovná

Zarovnání tvaru frézy % 80 %

Zobrazit podsekřivé Použít

OK Zrušit

CoCr SLM/preparácia na schodík

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Spára pro cement

☒ Bez spáry pro cement.

☐ Spára 0,06 mm

Přidat další oblast...

Výška odlehčení

☒ Od okraje 0,3 mm

Přidavné odlehčení

Okluzně 0 mm

Radiálně 0,02 mm

OK Zrušit

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Parametry okraje korunky

1. Horizontální 0,1 mm


2. Sklon 0,1 mm

3. Úhel 60 °

4. Vertikální 0 mm

5. Okraj pod margin 0 mm

Znázornění parametrů

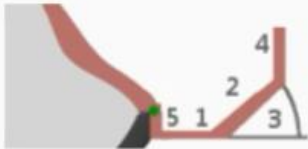

OK Zrušit

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Podsekřiviny

☐ Nevykrývat podsekřiviny

Úhel 0 °

Ochranná zóna v blízkosti preparace:

Velikost 0,1 mm

Frézování

☐ Rádus frézování

Zobrazit podsekřivé Použít

OK Zrušit

CoCr SLM/preparácia do stratená

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Spára pro cement

☒ Bez spáry pro cement.

☐ Spára 0,06 mm

Přidat další oblast...

Výška odlehčení

☒ Od okraje 0 mm

Přidavné odlehčení

Okluzně 0 mm

Radiálně 0,02 mm

OK Zrušit

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Parametry okraje korunky

1. Horizontální 0,15 mm


2. Sklon 0,1 mm

3. Úhel 60 °

4. Vertikální 0 mm

5. Okraj pod margin 0 mm

Znázornění parametrů

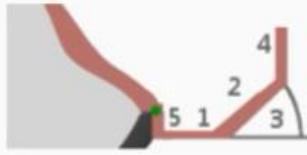

OK Zrušit

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Podsekřiviny

☐ Nevykrývat podsekřiviny

Úhel 0 °

Ochranná zóna v blízkosti preparace:

Velikost 0,1 mm

Frézování

☐ Rádus frézování

Zobrazit podsekřivé Použít

OK Zrušit

PMMA

Dosed korunky

SPÁRAOKRAJPODSEKŘÍVINY

Spára pro cement

☐ Bez spáry pro cement.

Spára

0,065 mm

Přidat další oblast...

Výška odlehčení

☐ Od okraje

0,3 mm

Přidavné odlehčení

Okluzně

0 mm

Radiálně

0,02 mm

OK

Zrušit

Dosed korunky

SPÁRAOKRAJPODSEKŘÍVINY

Parametry okraje korunky

1. Horizontální

0,15 mm

2. Sklon

0,1 mm

3. Úhel

60 °


4. Vertikální

0 mm

5. Okraj pod margin

0 mm

Znázornění parametrů

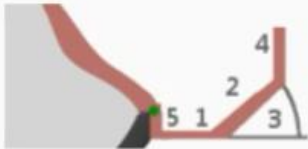

OK

Zrušit

Dosed korunky

SPÁRAOKRAJPODSEKŘÍVINY

Podsekřiviny

☐ Nevykrývat podsekřiviny

Úhel

0 °

Ochranná zóna v blízkosti preparace:

Velikost

0,1 mm

Frézování

☒ Rádus frézování

Průměr frézy

1,3 mm

☐ Tvar frézy, vypouklá/rovná

Zarovnání tvaru frézy %

80 %

Zobrazit podsekřivé

Použít

OK

Zrušit

 zuba

ZrO₂ na individuální abutment

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Spára pro cement

☒ Bez spáry pro cement.

☐ Spára 0,03 mm

Přidat další oblast...

Výška odlehčení

☒ Od okraje 0,5 mm

Přidavné odlehčení

Okluzně 0 mm

Radiálně 0,02 mm

OK Zrušit

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Parametry okraje korunky

1. Horizontální 0,2 mm

2. Sklon 0,2 mm

3. Úhel 65°

4. Vertikální 0 mm

5. Okraj pod margin 0 mm

Znázornění parametrů



OK Zrušit

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Podsekřiviny

☐ Nevykrývat podsekřiviny

Úhel 0°

Ochranná zóna v blízkosti preparace:

Velikost 0,1 mm

Frézování

☒ Rádus frézování

Průměr frézy 1,2 mm

☐ Tvar frézy, vypouklá/rovná

Zarovnání tvaru frézy % 80 %

Zobrazit podsekřivé Použít

OK Zrušit

Ti frézovaný/preparácia do stratená

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Spára pro cement

☒ Bez spáry pro cement.

☐ Spára 0,055 mm

Přidat další oblast...

Výška odlehčení

☒ Od okraje 0 mm

Přídavné odlehčení

Okluzně 0 mm

Radiálně 0,02 mm

OK Zrušit

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Parametry okraje korunky

1. Horizontální 0,1 mm

2. Sklon 0,15 mm

3. Úhel 70 °

4. Vertikální 0 mm

5. Okraj pod margin 0 mm

Znázornění parametrů

OK Zrušit

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Podsekřiviny

☐ Nevykřívat podsekřiviny

Úhel 0 °

Ochranná zóna v blízkosti preparace:

Velikost 0,1 mm

Frézování

☒ Rádus frézování

Průměr frézy 1,3 mm

☐ Tvar frézy, vypouklá/rovná

Zarovnání tvaru frézy % 80 %

Zobrazit podsekřivé Použít

OK Zrušit

Ti frézovaný/preparácia na schodík

Dosed korunky

SPÁRAOKRAJPODSEKŘIVINY

Spára pro cement

☐ Bez spáry pro cement.

Spára

0,055 mm

Přidat další oblast...

Výška odlehčení

☐ Od okraje

0,3 mm

Přídavné odlehčení

Okluzně

0 mm

Radiálně

0,02 mm

OK

Zrušit

Dosed korunky

SPÁRAOKRAJPODSEKŘIVINY

Parametry okraje korunky

1. Horizontální

0,01 mm

2. Sklon

0,1 mm

3. Úhel

90 °

4. Vertikální

0 mm

5. Okraj pod margin

0 mm

Znázornění parametrů



OK

Zrušit

Dosed korunky

SPÁRAOKRAJPODSEKŘIVINY

Podsekřiviny

☐ Nevykrývat podsekřiviny

Úhel

0 °

Ochranná zóna v blízkosti preparace:

Velikost

0,1 mm

Frézování

☒ Rádus frézování

Průměr frézy

1,3 mm

☐ Tvar frézy, vypouklá/rovná

Zarovnání tvaru frézy %

80 %

Zobrazit podsekřivé

Použít

OK

Zrušit

 zuba

Sklokeramika/kompozit/hybrid keramika

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Spára pro cement

☒ Bez spáry pro cement.

☐ Spára 0,05 mm

Přidat další oblast...

Zde je možné myší upravovat místa odlehčení pro cement ...
Obnovit všechny označené

Přidavné odlehčení

Okluzně 0 mm

Radiálně 0,02 mm

OK Zrušit

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Parametry okraje korunky

1. Horizontální 0,2 mm

2. Sklon 0,2 mm

3. Úhel 60 °

4. Vertikální 0 mm

5. Okraj pod margin 0 mm

Znázornění parametrů

OK Zrušit

Dosed korunky ? x

SPÁRA OKRAJ PODSEKŘIVINY

Podsekřiviny

☐ Nevykrývat podsekřiviny

Úhel 0 °

Ochranná zóna v blízkosti preparace:
Velikost 0,1 mm

Frézování

☒ Rádus frézování

Průměr frézy 1,3 mm

☐ Tvar frézy, vypouklá/rovná

Zarovnání tvaru frézy % 80 %

Zobrazit podsekřivé Použít

OK Zrušit

Nastavenie parametrov v Exocad

Pri nastavovaní parametrov v softvéri Exocad je dôležité zvoliť správne hodnoty, aby sme dosiahli optimálne výsledky. Uvedené hodnoty predstavujú priemerné hodnoty, ktoré môžu byť použité ako základ pri navrhovaní zubných náhrad. Je potrebné mať na pamäti, že tieto hodnoty je možné upravovať na základe individuálnych potrieb pacienta a typu preparácie zuba.